

INFORMACJE: **ectoAlerg spray do nosa**

Wyrób medyczny przeznaczony do leczenia i zapobiegania występowaniu objawów alergicznego nieżytu nosa oraz do łagodzenia i profilaktyki podrażnień i zapalenia błony śluzowej nosa. Przeznaczony dla wrażliwego nosa. Roztwór hipertoniczny zawierający działającą ochronnie ektoinę oraz naturalną sól alpejską.

1. Co to jest ectoAlerg spray do nosa i w jakim celu się go stosuje.

ectoAlerg spray do nosa może być stosowany w profilaktyce i leczeniu alergicznego nieżytu nosa (np. alergii na pyłki).

ectoAlerg spray do nosa zawiera hipertoniczny roztwór 2% Ektoiny i soli alpejskiej.

W wyniku stosowania Ektoiny, naturalnej cząsteczki o działaniu ochronnym – składnika posiadającego szczególne właściwości ochronne dla komórek, właściwości nawilżające oraz zdolność tworzenia ochronnego kompleksu wodnego - ectoAlerg spray do nosa chroni przed szkodliwym wpływem alergenów, odwodnienia błony śluzowej nosa oraz ułatwia regenerację wrażliwej błony śluzowej nosa. Zawartość soli i wartość pH kropli zostały tak dopasowane, że ectoAlerg spray do nosa jest bardzo dobrze tolerowany.

ectoAlerg spray do nosa nie zawiera środków konserwujących.

Specjalny system aplikacji chroni przed potencjalnym wnikaniem drobnoustrojów do sprayu do nosa.

2. Kiedy nie stosować ectoAlerg spray do nosa.

Preparatu ectoAlerg spray do nosa nie należy stosować po operacjach nosa, urazach nosa oraz w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub którykolwiek ze składników preparatu.

3. Kiedy zachować ostrożność stosując preparat ectoAlerg spray do nosa.

W przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie ma konieczności stosowania środków ostrożności innych niż wymienione powyżej.

4. Stosowanie ectoAlerg spray do nosa z innymi preparatami.

W normalnych warunkach użytkowania nie są znane interakcje z innymi preparatami.

5. Uwagi dotyczące ciąży i karmienia piersią.

Obecnie brak jest danych dotyczących stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. W przypadku ciąży lub karmienia należy poradzić się lekarza, gdyż zastosowanie preparatu powinno mieć miejsce po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

6. Jak stosować preparat ectoAlerg Spray do nosa.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykła dawka stosowana u dorosłych i dzieci wynosi 1-2 rozpylenia do każdego otworu nosowego. Dzieci w wieku poniżej 10 lat powinny stosować ectoAlerg spray do nosa w obecności osoby dorosłej.

Ze względów higienicznych (utrzymanie produktu bez bakterii) każdy produkt należy stosować wyłącznie u jed-

nej osoby. Technologia zastosowana w produkcji wyklucza możliwość wniknięcia drobnoustrojów do butelki. Z tego względu nie ma konieczności stosowania środków konserwujących. Nie mniej jednak nie należy stosować produktu 6 tygodni po pierwszym użyciu.

7. Możliwe działania niepożądane preparatu ectoAlerg spray do nosa.

Dotychczas nie są znane występujące regularnie lub utrzymujące się działania niepożądane będące wynikiem stosowania ectoAlerg spray do nosa. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem ectoAlerg spray do nosa należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

8. Okres przechowywania preparatu ectoAlerg spray do nosa.

Data ważności preparatu ectoAlerg spray do nosa zamieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym oraz na butelce. Nie należy stosować ectoAlerg spray do nosa po upływie terminu ważności. Po otwarciu opakowania, preparatu nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni.

9. Dodatkowe uwagi

Należy przechowywać ectoAlerg spray do nosa w temperaturze między 2°C i 40°C.

10. Postać i zawartość preparatu ectoAlerg spray do nosa.

Postać: Butelka zawierająca 20 ml roztworu: zawierającego 2% ektoinę, wodę i naturalną sól alpejską. Jedno rozpylenie zawiera 0,14 ml roztworu.

11. Dystrybucja i informacje.

Fa Langsteiner Lek-Pharmaceutical

ul. Białoprądnicka 16

31-221 Kraków

tel 12 420 16 80

www.langsteiner.eu

